

Karta do usuwania kleszczy Bros



Cena: 12,29 zł

Opis słownikowy

Producent Bros

Opis produktu

Karta do usuwania kleszczy Bros

Karta umożliwia szybkie, samodzielne usuwanie kleszczy, które mogą przenosić groźne choroby, m. in. boreliozę czy zapalenie opon mózgowych. Może być stosowana do wyciągania kleszczy u ludzi i zwierząt. Dzięki dwóm rozmiarom nacięć, nadaje się do usuwania zarówno osobników dorosłych, jak i nimf. Ponadto jest pomocna przy wyciąganiu żądła pszczoł. Karta wyposażona jest w lupę, która znacznie ułatwia przeprowadzenie zabiegu. Poręczny, mały format sprawia, że mieści się ona w portfelu.

Główne cechy:

- umożliwia samodzielne, natychmiastowe usunięcie kleszcza
- nadaje się również do usuwania żądła pszczoł
- wyposażona w lupę ułatwiającą przeprowadzenie zabiegu
- może być stosowana zarówno u ludzi, jak i u zwierząt,

Sposób użycia:

W zależności od rozmiaru kleszcza, wybrać mniejsze lub większe nacięcie karty.

1. Przycisnąć kartę do skóry i ostrożnie wsunąć jej odpowiednią część pod ciało kleszcza.
2. Delikatnie przesunąć kartę, unosząc ją lekko do góry i płynnym ruchem usunąć kleszcza ze skóry.
3. Za pomocą wbudowanej lupy sprawdzić, czy kleszcz został usunięty w całości.
4. Zdezynfekować miejsce po zabiegu i obserwować jego wygląd.

5. W przypadku widocznego zaczerwienienia lub podejrzenia infekcji, skonsultować się z lekarzem.

Uwaga! Warto zachować usuniętego kleszcza na wypadek konieczności jego zbadania.

Galeria



BROS